

Инструкция №6
по применению полосок индикаторных «АспироТайп-ТЕСТ»
для экспресс-контроля рабочих растворов средства дезинфицирующего «АспироТайп»
(продукция выпускается ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» под заказ для ООО «Евротайп Рус», Россия)

1. Назначение

Полоски индикаторные «АспироТайп-ТЕСТ» (далее - индикаторные полоски) предназначены для визуальной оценки концентраций рабочих водных растворов средства дезинфицирующего «АспироТайп».

Выпускаются в соответствии с ТУ 20.59.52-072-46842767-2022.

В комплект поставки входят: индикаторные полоски, пенал со шкалой сравнения, инструкция по применению.

Индикаторные полоски «АспироТайп-ТЕСТ» обеспечивают экспресс-анализ качества рабочих растворов средства дезинфицирующего «АспироТайп» персоналом медицинских организаций стоматологического профиля.

2. Указания по применению

Перед использованием индикаторных полосок удостоверьтесь в том, что их срок годности, указанный на этикетке пенала, не истек.

При первом вскрытии пенала с индикаторными полосками на его этикетке укажите дату вскрытия упаковки и дату истечения срока годности индикаторных полосок во вскрытом пенале.

Каждая индикаторная полоска может использоваться только однократно.

Для каждого определения концентрации необходимо использовать новую порцию рабочего раствора.

Не удаляйте избыток раствора с полосок фильтровальной бумагой.

Сопоставление цвета чувствительной зоны индикаторной полоски с цветом элемента сравнения (шкалы) следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном) свете или искусственном освещении.

Определение концентраций рабочего раствора осуществляют трехкратно (с помощью трёх полосок и трех проб). Результат определения считается достоверным, если он оказался одинаковым не менее чем в двух наблюдениях.

Внимание: соблюдайте все требования данной инструкции в отношении времени и последовательности – при несоблюдении цвет зон индикаторных полосок будет недостоверным.

В случае получения неоднозначных результатов оценки концентраций методом экспресс-контроля, количественное определение концентрации средства дезинфицирующего в рабочем растворе необходимо провести методом титрования (методики определения предоставляется потребителю по запросу).

Контроль рабочих растворов средства дезинфицирующего «АспироТайп» концентраций 1,0%; 2,0%; 3,0% по препарату

- отберите пробу рабочего раствора средства дезинфицирующего «АспироТайп» объемом 100 мл, приготовленного в соответствии с Инструкцией по применению дезсредства №Д-71А/22.

- в стаканчик из стекла или пластика отберите из этой пробы около 30 мл рабочего раствора «АспироТайп».

- из пенала извлеките одну индикаторную полоску, на 1-2 секунды погрузите полностью всю ее чувствительную зону в анализируемый раствор, извлеките обратно из раствора, быстро удалите избыток жидкости, проведя ребром полоски о край мерной емкости, и через 30 секунд проведите визуальную оценку цвета в соответствии с цветовой шкалой сравнения, размещенной на этикетке пенала.

3. Требования безопасности

Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности и защиты окружающей среды не требуется.

После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовой отход.

4. Хранение и транспортирование

Хранение индикаторных полосок «АспироТайп-ТЕСТ» осуществляют в плотно закрытой оригинальной упаковке производителя при температуре не выше +40°C и влажности не более 80%, в условиях не допускающих воздействие паров химических веществ, открытого огня и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов, в местах недоступных животным и детям.

Транспортирование и кратковременное хранение полосок индикаторных допускается при любых температурах ниже 0°C.

Срок годности невскрытой упаковки - 1,5 года с даты изготовления, указанной на упаковке.

Вскрытую упаковку использовать в течение 3-х месяцев.