

**Торговое название:** Queenetch

**Показания к применению:**

Предназначен для протравливания эмали и дентина, для обеспечения лучшей адгезии реставрационных материалов к зубу в процессе подготовки зуба к пломбированию

**Состав:**

фосфорная кислота 38%, бидистиллированная вода, силикогель, пигмент.

**Способ применения:**

Небольшое количество геля нанести аппликатором или с помощью насадки-канюли на препарированную промытую и просушенную поверхность эмали (время воздействия - 30 секунд) или дентина (время воздействия - 15 секунд). Для обработки эмали и дентина общее время протравливания составляет 30-45 секунд. Затем гель тщательно смыть водно-воздушной струей и просушить протравленную поверхность струей воздуха.

Если на протравленной поверхности эмали не появился меловой матовый оттенок, то процедуру травления необходимо повторить.

Затем протравленную поверхность следует обработать праймером/ адгезивом и приступить к реставрации.

После каждого применения материал следует плотно закрывать крышкой.

**Комплектация:**

Гель для травления «Queenetch» в шприце, 5 г – 1 шт.;

- инструкция по применению- 1 шт.

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала, аллергия.

Не использовать не по назначению.

Может вызывать раздражения в результате прямого контакта с пульпой. Поэтому область вокруг пульпы следует покрыть тонким слоем гидроксида кальция.

**Меры предосторожности:**

Беречь от детей!

Только для стоматологического использования!

Перед использованием наденьте подходящую защитную одежду и перчатки.

Избегайте контакта с глазами. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

В случае попадания на кожу промыть большим количеством воды с мылом.

**Условия хранения для медицинских изделий**

Хранить при температуре от 5 °С до 25 °С; относительная влажность 10-95%

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Беречь от влаги.

Закройте шприц сразу после использования, чтобы избежать воздействия света.

**Срок годности:**

Срок годности материала **3 года** Не применять после истечения срока годности.

**Утилизация**

Изделие не относится к опасным отходам. Утилизировать в соответствии с общепринятой медицинской практикой и применимыми местными, государственными и федеральными законами и нормативными актами. Класс опасности для медицинских отходов с учетом спецификации морфологического состава (в соответствии с Санитарными Правилами и Нормами Российской Федерации 2.1.7.2790-10): Класс А

**Производитель:**

Queen Dental GmbH

Neue Straße 67, 99846 Seebach, Germany

Нэо штрассе 67, 99846 Зеебах, Германия

Телефон: +49 36929 139999  
E-mail: [sales@queendental.de](mailto:sales@queendental.de)